



Sil-Pak™

REF 46190 ist gedacht für die Verwendung mit Hufpad oder Platten aller Art. Sil-Pak ist ein Zweikomponenten-Silikon, das sich selbstständig mischt und in 2 Minuten abbindet. Sil-Pak muss immer in Verbindung mit einer Hufplatte oder einer orthopädischer Platte verwendet werden. Sil-Pak klebt nicht am Huf, aber schützt die Sohle und den Strahl und verhindert dass Schmutz sich unter der Platte festsetzt.

Wird Sil-Pak mit einer orthopädischen Platte eingesetzt, kann es leicht entfernt und ersetzt werden.

Sil-Pak ist ein **günstiges, stoßdämpfendes** Hufpolster, das **flexibel** und **formbeständig** ist.

Sil-Pak ist, im Gegensatz zu herkömmlichen Silikonen, säurefrei und die Sohle wird dadurch nicht negativ beeinflusst.

WAS SIL-PAK NICHT IST

Sil-Pak ist kein Ersatz für Equi-Pak. Equi-Pak benötigt keine Hufplatte, bindet in 30 Sekunden ab, klebt am Huf, ist sehr zäh, bietet besseren Schutz und hat hervorragende Stoßdämpfende Eigenschaften.

BITTE BEACHTEN

- Vettec-Produkte müssen bei einer Temperatur von 18° – 30°C verwendet werden
- Nässende, blutende oder infektiöse Hufbereiche müssen ausgespart werden. Ist die Wunde verheilt, so kann mit dem Einsatz begonnen werden.
- Vettec-Produkte dürfen nicht gebrannt werden
- Benutzen Sie ausschließlich die Vettec-Mischkanülen
- Halten Sie die Mischpistole sauber

VERARBEITUNG

1. Um die Kartusche zu öffnen, wird mit der Hufschneidezange an markierter Linie der Verschluss abgezwickt. Geben Sie die Kartusche mit der Aufschrift nach oben in die Mischpistole.
2. Bevor die Mischkanüle auf die Kartusche aufgesteckt wird, etwas Sil-Pak herausdrücken, damit beide Mischkolben auf gleichem Niveau sind.
3. Die Mischdüse auf die Kartusche aufsetzen und im Uhrzeigersinn drehen.
4. Nach der Verarbeitung wird die Kanüle entfernt und die Verschlusskappe wie die Kanüle aufgebracht. Die Verschlusskappen (REF 46910) erhalten Sie von Ihrem Händler.
5. Für weitere Anwendungen ist mit einer neuen Kanüle genau gleich zu verfahren.

HUFZUBEREITUNG

Bearbeiten Sie die Sohle soweit als nötig und säubern Sie die Sohle gründlich mit einer Drahtbürste.

Wenn das Pferd mit Eisen und Hufplatte fertig beschlagen ist, wird Sil-Pak von der Tracht her über die seitlichen Strahlfurchen eingefüllt.

Sollte das nicht möglich sein, so bohren Sie ein 8mm großes Loch nahe der Strahlspitze in die Platte.

Über diese Bohrung füllen Sie Sil-Pak nun ein, bis es hinten an der Tracht heraus kommt.

Verschließen Sie das Loch mit einem Stück Klebeband.

Nach ca. 2 Minuten kann der Huf abgesetzt werden.

Eingeschränkte Haftung: Befolgen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig. Wird Ihre Arbeitsweise in dieser Gebrauchsanleitung nicht beschrieben, rufen Sie unter (+31) -30-2411823 an, ehe Sie dieses Produkt verwenden. Der Käufer erklärt sich damit einverstanden, dass bei einem nachweisbaren Defekt von Vettec-Produkten dem Benutzer ausschließlich das defekte Vettec -Produkt ersetzt oder der Kaufpreis für die defekte Menge zurückerstattet wird. Der Hersteller haftet nicht für direkte, indirekte, gelegentliche oder dauerhafte Schäden, unbeschadet der strittigen rechtlichen Theorie einschließlich der Vorbringung von Fahrlässigkeit und Gefährdungshaftung. 05/06

